

SERIE ZERO G



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

ZERO-G



CARACTERÍSTICAS



CONTROL



- 01 Movimiento sincronizado del asiento haciendo la función de gravedad cero.
- 02 OPCIÓN UNO - Movimiento simultáneo de respaldo y piernas por resorte de gas.
- 03 OPCIÓN DUO - Movimiento independiente de respaldo y piernas por 2 resortes de gas.
- 04 Repozabrazos ajustable en altura.



ERGONOMÍA



- 05 Respaldo de talla alta y repozacabeza ajustable.
- 06 Ganchos bilaterales para colgar bolsas de drenos/orina.
- 07 OPCIÓN de mesilla extraíble de comidas/actividades.
- 08 OPCIÓN de cojín de poliuretano integral para extracción de sangre.



SEGURIDAD



- 09 Asiento extraíble para un lavado profundo.
- 10 Tapizado de tela lavable y retardante al fuego, clase M2.
- 11 Bloqueador de seguridad en caso de avería de los resortes de gas.
- 12 Pegatinas informativas para un uso seguro del equipo.



MOVILIDAD



- 13 OPCIÓN de ruedas Ø100mm carenadas en ABS, con 2 frenos locales.
OPCIÓN de ruedas Ø125mm carenadas en ABS, con freno central a las rodas traseras.
- 14 OPCIÓN de repozapiés escamoteable.
- 15 OPCIÓN de portasueros intercambiable y ajustable.
- 16 Barra de transporte.

ZERO-G

zero gravity patient chairs





CONTROL




01 LA GRAVEDAD CERO



POSICIÓN DE GRAVEDAD CERO
La posición de Zero-G es la más ergonómica y relajante postura para el cuerpo humano. Una articulación sincrónica en una cierta proporción, simulando las condiciones de ingravidez y la correspondiente disminución de la presión atmosférica sobre el cuerpo humano. Esta técnica de posicionamiento aplicada a pacientes ingresados en planta hospitalaria proporciona una terapia de rehabilitación y un descanso extraordinario.

02 OPCIÓN UNO

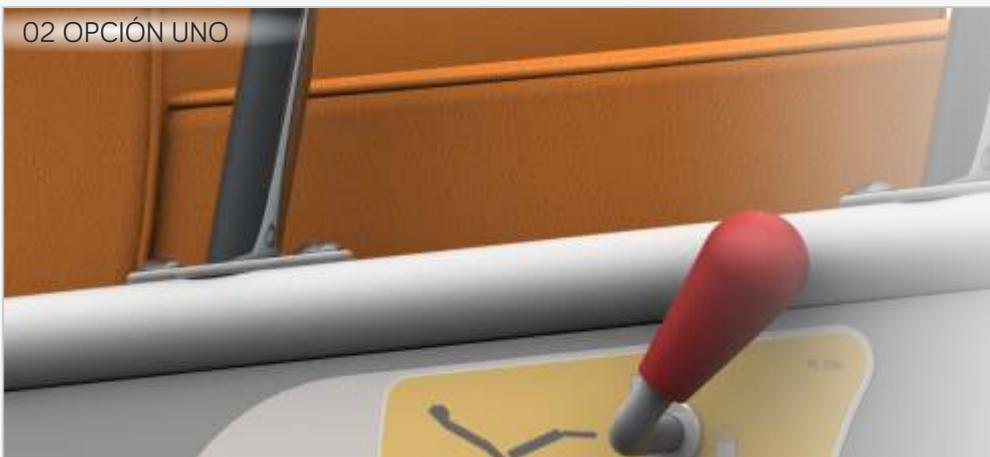

OPCIÓN UNO
Modelo equipado con un resorte de gas para la articulación sincronizada del respaldo y de las piernas.

03 OPCIÓN DUO



OPCIÓN DUO
Modelo equipado con 2 resortes de gas para el movimiento independiente de respaldo y de las piernas.

04 REPOSABRAZOS AJUSTABLE



AJUSTABLE EN ALTURA

Los reposabrazos del sillón ZERO-G son ajustables en altura para quedar de acuerdo con la talla del paciente. Esta característica permite que todos los pacientes puedan tomar su descanso con los brazos apoyados.

TRASLADO LATERAL

Los reposabrazos se abaten completamente hacia la altura del asiento para permitir un traslado lateral de la cama al sillón y viceversa muy útil en pacientes particularmente debilitados.

09 REPOSACABEZAS



REPOSACABEZAS

El tapizado del sillón ZERO-G tiene un diseño ergonómico para proporcionar el máximo confort y descanso al paciente.

El respaldo es talla alta e incluye un reposacabezas ajustable en altura.

10 SOPORTE DE BOLSAS



SOPORTE DE BOLSAS

Para garantizar una movilidad segura de los pacientes el Zero-G está equipado de ganchos bilaterales para colgar bolsas de drenos/orina.

11 RECOGIDA DE SANGRE



RECOGIDA DE SANGRE

Como una opción extra el sillón ZERO-G puede incorporar un cojín de poliuretano integral para recoger la sangre. El cojín es de adaptación bilateral e flexible para mejor adaptación al brazo del paciente.

12 ATRIL DE COMIDAS



ATRIL DE COMIDAS

Como una opción extra el sillón ZERO-G puede ser provisto de un atril de ABS, con bordes moldeados para evitar la caída de objetos, para comidas o demás actividades terapéuticas.

◀ SEGURIDAD ▶

09 ASIENTO DESMONTABLE



TAREAS DE LIMPIEZA

El asiento de los sillones ZERO-G son desmontables sin recurso a herramientas para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento.

10 TAPIZADO DE ALTA CALIDAD




TAPIZADO DE ALTA CALIDAD

Tapizado en tela de vinil resistente al lavado por un paño húmedo con agua tibia y un detergente basado en el alcohol.

Por razones de seguridad la tela incorpora un tratamiento retardante al fuego según la clase M2.


11 BLOQUEADOR DE SEGURIDAD

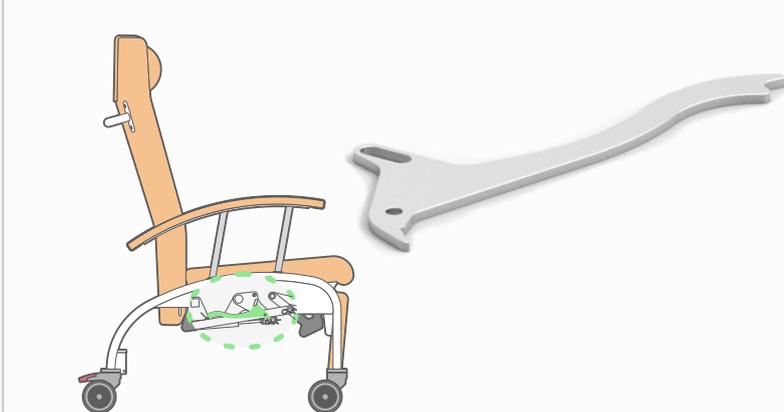

BLOQUEADOR DE SEGURIDAD

Un dispositivo de bloqueo permite el uso en modo seguridad, incluso cuando los resortes de gas revelan una anomalía y quedan estropeados.


12 ETIQUETA INFORMATIVAS

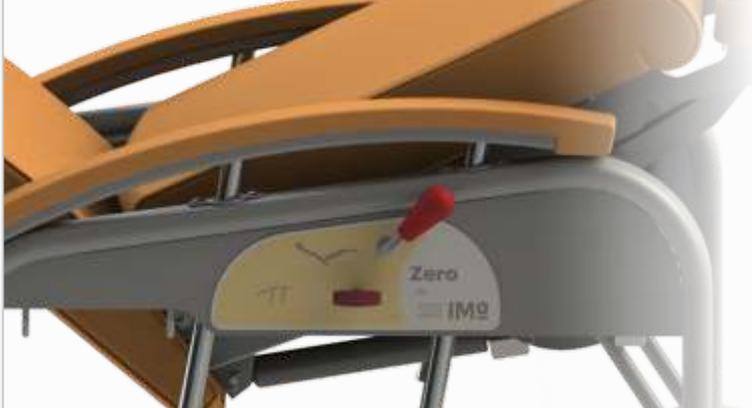

ETIQUETA INFORMATIVA

Los mandos quedan desplazados sobre pegatinas para el uso seguro e informado del funcionamiento del sillón ZERO-G.

13 OPCIÓN DE RUEDAS

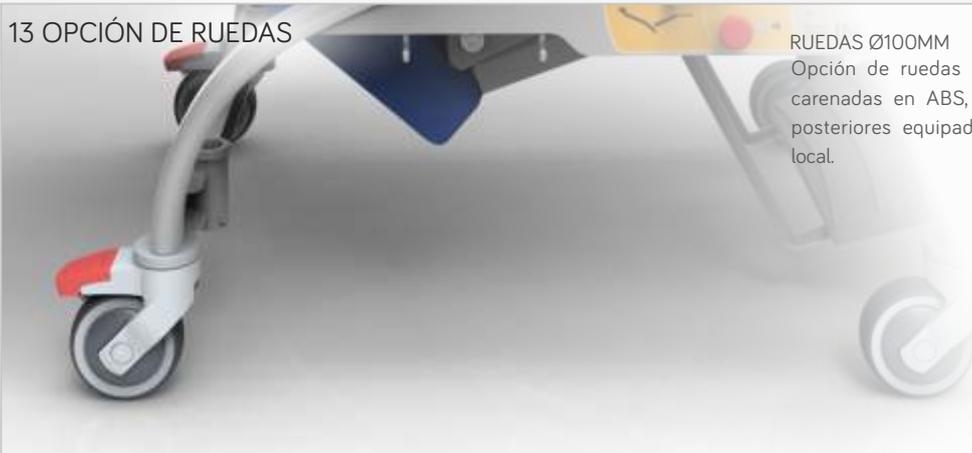

RUEDAS Ø100MM

Opción de ruedas de Ø100mm, carenadas en ABS, siendo las 2 posteriores equipadas con freno local.

RUEDAS Ø125MM

Opción de ruedas de Ø125mm, carenadas en ABS y sistema de freno central a las ruedas posteriores.



14 OPCIÓN DE REPOSAPIÉS



REPOSAPIÉS

Opción de reposapiés para traslado confortable del paciente. La estructura es telescópica y recoge bajo el asiento cuando no está en uso. El reposapiés es de ABS con una textura antideslizante.


15 OPCIÓN DE PORTASUEROS



PORTASUEROS


Opción de portasueros de adaptación bilateral. Varilla de acero inox ajustable en altura con 2 ganchos de cuelgue.

16 ALA DE TRASLADO

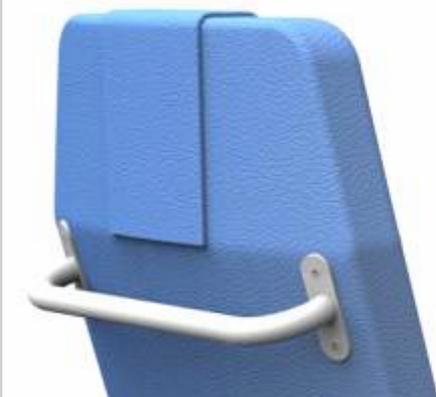

ALA DE TRASLADO

El sillón tiene una ala de traslado ubicada en el lado posterior del respaldo para transporte del paciente por celadores.

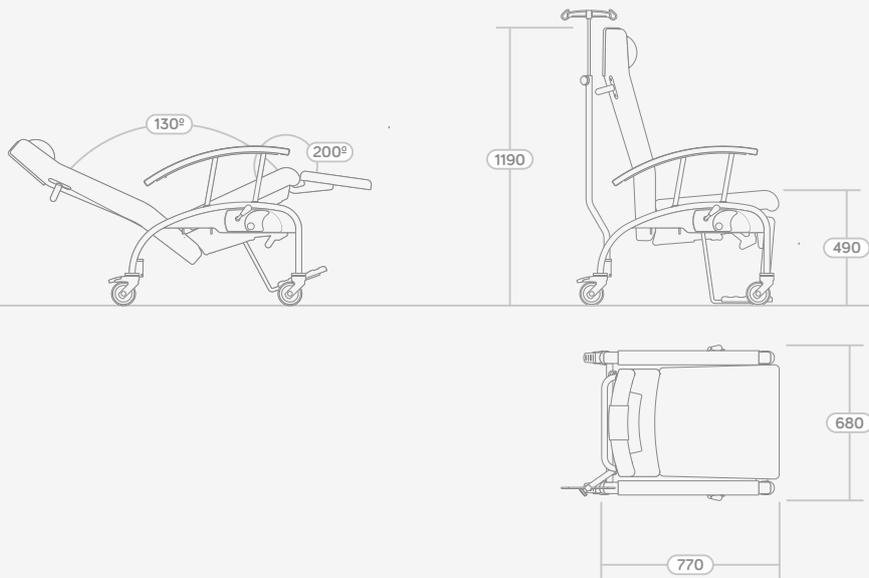

DIMENSIONES (±5%)

Altura total	1190 mm
Ancho total	680 mm
Largo total	770 mm
Altura del asiento	490 mm

ARTICULACIONES (±5%)

Ángulo max. (resp./asiento)	130°
Ángulo min. (asiento/piernas)	200°
Relación sincro (resp./asiento)	2/5





CAPACIDADES (±5%)

Carga maxima	140 Kg
Peso total	32 Kg
Potencia resorte - UNO	800 N
Potencia resorte - DUO	800 N / 200 N

REGISTRO Y CONFORMIDAD

Registrado oficialmente como Dispositivos Médicos de Clase I. Marcación CE.
 El producto cumple la directiva europea UE 2007/47/EE, D60-070, D61-070, EN 1021-1, EN 1021-2.
 Es un producto controlado bajo el sistema de gestión de la calidad EN ISO 9001:2008

Colores indicativos, chequear con muestras reales

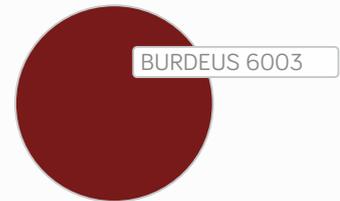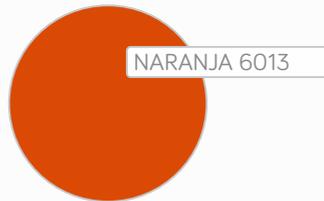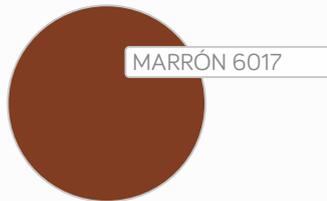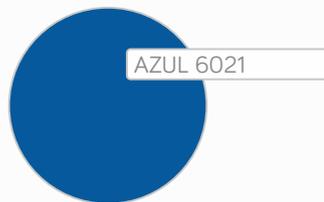



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)